

Disnemar®/Disnemar® baby
Fizjologiczny roztwór donosowy

Co to jest Disnemar/Disnemar baby?

Disnemar/Disnemar baby jest izotonicznym roztworem soli mineralnych o neutralnym pH, który może być stosowany w obrębie jamy nosowej, bez podrażniania błony śluzowej nosa. Specjalnie zaprojektowany dozownik (rozpylacz) wyrobu umożliwia jego podawanie w każdej pozycji (również w pozycji leżącej). Niewielkie, wygodne do przenoszenia opakowanie pozwala na stosowanie roztworu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Przezroczysta butelka umożliwia stałą kontrolę ilości roztworu.

Disnemar jest zalecany do stosowania u dorosłych.

Disnemar baby jest zalecany do stosowania u dzieci i niemowląt (już od 1. dnia życia).

W jakim celu stosuje się Disnemar/Disnemar baby?

Disnemar/Disnemar baby jest wskazany do utrzymywania codziennej higieny nosa i prawidłowego stanu błony śluzowej nosa. Fizjologiczny roztwór soli mineralnych o neutralnym pH oczyszcza oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację. Dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu łagodzi objawy niedrożności nosa.

Disnemar/Disnemar baby posiada specjalny dozownik (rozpylacz) – nebulizator mikrodyfuzyjny, który zapewnia aplikację roztworu w postaci delikatnej mgiełki. Dzięki temu można osiągnąć optymalne nawilżenie błony śluzowej nosa bez negatywnej reakcji dziecka na aplikację.

Wskazania:

Disnemar/Disnemar baby zalecany jest szczególnie:

- do codziennej higieny nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych
- do nawilżania wysuszonej błony śluzowej nosa spowodowanej różnymi przyczynami np. działaniem klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dymem papierosowym, kurzem, nawracającymi infekcjami błony śluzowej nosa, podeszłym wiekiem
- do udrożnienia nosa przy niedrożności nosa spowodowanej:
 - stanami kataralnymi i alergicznymi takimi jak: przeziębienie, nieżyt nosa czy ostre/przewlekłe zapalenie zatok
 - zanieczyszczonym powietrzem (np. duże zapylenie).

Co należy wiedzieć zanim zastosuje się Disnemar/Disnemar baby?

Wyrób można stosować:

- w profilaktyce i wspomagająco w trakcie leczenia
- w okresie ciąży i karmienia piersią
- w każdym wieku (u niemowląt, dzieci i dorosłych)
- codziennie, kilka razy w ciągu dnia - przez dowolnie długi czas.

Disnemar/Disnemar baby zawiera

- wodę oczyszczoną o neutralnym pH
- elektrolity - tzn. jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany
- środek konserwujący - chlorek benzalkonium, który zapobiega zakażeniu roztworu przez bakterie.

Rodzaje opakowań

Opakowanie wyrobu **Disnemar/Disnemar baby** zawiera 25 ml izotonicznego roztworu

wodnego o neutralnym pH i jest zaopatrzone w specjalny dozownik (nebulizator mikrodyfuzyjny), który każdorazowo rozpyla tę samą ilość roztworu. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa jednorazowego podania zbyt dużej ilości płynu.

Z jednego opakowania otrzymuje się aż do 250 dawek.

W celu ułatwienia podawania wyrobu osobom w różnym wieku dostępne są dwa rodzaje opakowań:

- **Disnemar** dla dorosłych (opakowanie zielone). Wielkość i budowa dozownika (rozpylacza) umożliwia równomierne rozprowadzenie wyrobu na powierzchni błony śluzowej nosa.
- **Disnemar baby** dla niemowląt i dzieci (opakowanie niebieskie). Posiada dozownik (rozpylacz) o specjalnym kształcie i wielkości końcówki, który pozwala na łatwe wprowadzenie go do otworu nosowego dziecka.

Jak i kiedy stosować Disnemar/Disnemar baby?

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę.

U niemowląt zaleca się stosowanie wyrobu **Disnemar baby** przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa umożliwia połykanie pokarmu bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, związanych z połykaniem powietrza.

Dorośli: jedna do dwóch dawek do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę.


Jeśli to konieczne **Disnemar** może być stosowany przez dłuższy czas bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.

Sposób użycia

Przed podaniem wyrobu **Disnemar/Disnemar baby** po raz pierwszy należy nacisnąć dozownik 1–3 razy, aby aktywować pompkę dozującą i uzyskać odpowiednie rozpylenie roztworu.

Po dłuższym okresie nieużywania może zaistnieć konieczność powtórzenia wyżej opisanej czynności.

Nie zaleca się wyjmowania dozownika po użyciu. Jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia go, należy użyć ręcznika lub chusteczki. Dzięki specjalnej budowie zaworu pompki (zapobiega cofaniu się roztworu) dozownik pozostaje czysty przez cały okres ważności wyrobu.

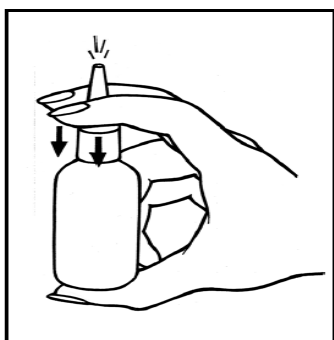

Naciskanie dozownika



Podanie dawki dziecku w pozycji leżącej

UWAGA

Disnemar/Disnemar baby należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Wytwórca

BGP Products Operations, S.L.

Avda de Burgos 91

28050 Madryt
Hiszpania

Dystrybutor
Mylan EPD Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa

Data sporządzenia ulotki: 06/2015

CE